



Rebound
Medical & Safety

WANTAI

Antigen Schnelltest

CE-gekennzeichneter SARS-CoV-2-Schnelltest
(Nicht-invasiv & schmerzfrei testen)

UNSER LAGER – BEREIT ZUM VERSAND


Wenn bei Ihnen oder Ihren Kindern sämtliche Alarmglocken angehen, sobald Sie an eine neue COVID-Testung denken, haben wir die passende Antwort für Sie. Eine schmerzfreie und komfortable Alternative mit sehr guter Leistung, einem fairen Preis und 15-minütigen Ergebnissen.

Was ist der Unterschied zu anderen Herstellern?

Viele Schnelltests erfordern tiefe Abstriche aus der Nase oder dem Rachen. Das WANTAI-Kit arbeitet hingegen mit einem einfachen Abstrich aus dem vorderen Teil der Nase, oder dem Mund. Trotz der leichten Handhabung ist es nachweislich eines der genauesten Test-Kits auf dem heutigen Markt.

Leistung ist der Schlüssel

In einer unabhängigen, europäischen Qualitätsprüfung wurden 700 Personen ausgewählt, die PCR-Tests nutzten. 200 Personen, mit Infektionen innerhalb der letzten 7 Tage, wurden dabei als positiv bestätigt - 500 als COVID-frei. Das WANTAI-Test-Kit identifizierte 192 von 200 bestätigten positiven Fällen und weist eine sehr gute Genauigkeit von 96 % auf.

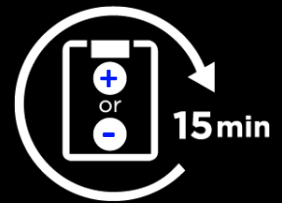

Kreuzreaktivität


Sie wollen sicher sein, dass ein positives Ergebnis nicht auf ein anderes Virus zurückzuführen ist? Getestet mit den 30 häufigsten Erregern der Atemwege, wie z. B. Influenza und Rhinovirus, werden Kreuzreaktivitäten ausgeschlossen.

Selbsttest vs. professionelle Anwendung

Von 500 Personen wurden bei einem kontrollierten Test je zwei Abstriche gemacht – Einer von professionellem Laborpersonal, der Zweite von den Patienten selbst. Die Ergebnisse von Fachleuten und Laien unterschieden sich bei der Sensitivität lediglich um 1,5 % und stimmten bei der Spezifität zu 100 % überein.



**Rebound
Medical & Safety**

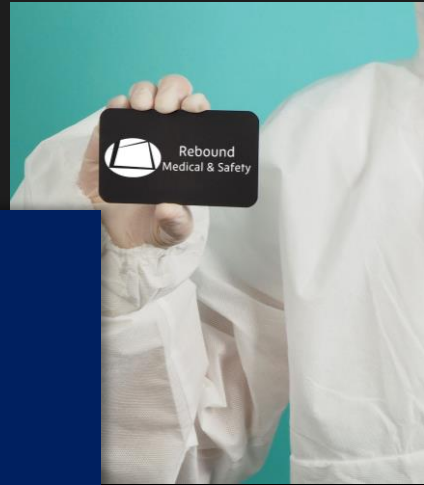

Kontaktieren Sie uns




psa@reboundeu.com



www.reboundeu.com/psa



+49 89 26 200 610

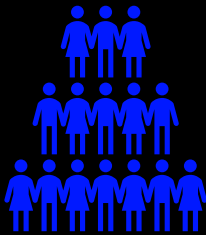

99.6%

Alle 500 Probanden waren in der Lage, die Anweisungen einwandfrei zu verstehen und den Test selbst durchzuführen

Einfach zu bedienen und dabei genau

Um die bestmögliche Testgenauigkeit zu gewährleisten, finden Sie unter diesem QR-Code ein kurzes Schulungsvideo, das Sie Schritt für Schritt durch den Testablauf führt.

Öffnen Sie dafür einfach Ihre Telefonkamera und richten Sie sie auf den QR-Code, um das Video zu sehen.



CE-geprüft für professionelle Anwendung und Selbsttest

Dieses WANTAI-Test-Kit ist sowohl für den professionellen Einsatz wie auch für den Selbsttest CE-gekennzeichnet. Die meisten Kits auf dem Markt werden entweder für den professionellen Gebrauch oder im Rahmen einer temporären Notfallzulassung (EUA) geliefert – selten für beides.

Ihre zwei Bestelloptionen



WJ-2901

Lieferumfang	WJ-2901
Testkassette	1x
Extraktionsfläschchen	0.3ml, 1x
Steriler Einmaltupfer	1x
Verschließbarer Plastikbeutel	1x
Gebrauchsanweisung	1x
Bedienungsanleitung	1x

Bitte rufen Sie uns für unsere aktuellen Lagerpreise und Mindestbestellmengen an

WJ-2910

Lieferumfang	WJ-2910
Testkassette	10x
Extraktionsfläschchen	0.3ml, 10x
Steriler Einmaltupfer	10x
Verschließbarer Plastikbeutel	10x
Gebrauchsanweisung	1x
Bedienungsanleitung	1x

Bitte rufen Sie uns für unsere aktuellen Lagerpreise und Mindestbestellmengen an